

PHYSIO THERM®  
Infrarotkabinen



LAVAcare  
PHYSIO THERM®

... příjemné teplo pro celou rodinu!

# LAVAcareTERMOPOLŠTÁŘ

*... teplo užíváme již po staletí k zmírnění různých zdravotních potíží*

- ≡ Příruční kompaktní formát
- ≡ Dlouho trvající teplo pro různé oblasti použití
- ≡ Připravený k použití během minut
- ≡ Jednoduché ohřátí v mikrovlnce nebo v troubě
- ≡ Ideální k předehtání postele či dětského kočárku
- ≡ Nezchladne pod tělesnou teplotu
- ≡ Hygienický, prací potah
- ≡ Při akutních bolestech použitelný jako chladící polštář



# Účinek

... LAVAcare dodává dlouhotrvající teplo a podpůrně se nasazuje při:

- ≡ Přepnutí svalů a při bolestech zad, kloubů, břicha a podbřišku
- ≡ K lokální regeneraci poranění po akutní fázi
- ≡ K ulehčení usínání
- ≡ K zlepšení lokálního prokrvení (např. studené nohy)



# Použití

Termopolštář LAVAcare lze použít mnoha způsoby k tišení bolestí a zdravotních potíží, čímž přispívá k pocitu zdraví.



Břicho



Šíje



Koleno



Nohy



Ramena



Záda

# Zacházení

... použitelný za několik minut:



Ohřejte v mikrovlnce při 600 Watt max. 2 minuty  
Potah před ohřátím sejměte!



V troubě při ca. 150° C ohřívejte 15 - 20 minut



Ohřátý polštář položte na zvolené místo na těle  
a vychutnejte útulné teplo.

Při citlivé pleti zabalte polštář do ručníku.



LAVAcare lze použít i pro studenou kompresi.

Polštář vložte před použitím na 15 – 20 minut do chladícího boxu.

# Termopolštář LAVAcare od Physiothermu Vám prostě udělá dobře!

